

鼻腔抗过敏粉末敷料—使用说明书

【产品名称】鼻腔抗过敏粉末敷料

【结构组成】本产品由粉末和输送装置组成，以非无菌状态提供。BRAB-P 型产品所含粉末成分：羟丙甲纤维素、薄荷脑；BRAB-LV 型产品所含粉末成分：羟丙甲纤维素、枸橼酸缓冲盐（枸橼酸及枸橼酸钠）及薄荷脑。输送装置为药用聚乙烯瓶。薄荷脑为矫嗅剂。本产品组分不具有药理学作用且不被人体吸收。

【型号规格】

型 号	规 格		
BRAB-P	500 mg/瓶	1000 mg/瓶	2000 mg/瓶
BRAB-LV	500 mg/瓶	1000 mg/瓶	2000 mg/瓶

【适用范围】


用于过敏性鼻炎患者、过敏性哮喘患者，通过阻隔致病性微生物及其他颗粒性过敏物质进入鼻腔，缓解因过敏性鼻炎、过敏性哮喘引发的相关症状。

【使用方法】

1. 使用前晃动瓶身使内容物均匀。
2. 打开瓶盖，挤压瓶身，测知一次喷出约五厘米高粉末所需力量。
3. 轻轻擤鼻子。
4. 以手指压住 1 个鼻孔，另一个鼻孔呼气。
5. 将本产品瓶口浅伸入未压住的鼻孔中。
6. 快速挤压瓶身，送入本产品一次剂量，同时轻轻吸气，使本产品粉末深入并附着在鼻黏膜上。
7. 稍等两秒，后对另一鼻孔重复 3 至 6 步骤，吸入本产品粉末。
8. 视需要可多次使用本产品！进入充满过敏原的环境或人员密集场所时可提前使用本产品。
9. 每次擤鼻涕后请再次使用本产品。



测知喷出粉末量

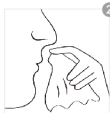

清洁



挤压瓶身



粉末附着形成屏障

【注意事项】

1. 使用前请阅读说明书。
2. 请勿使用包装破损产品。
3. 本品可重复使用,用后请确保瓶盖拧紧并置于干燥处保存,开封后请在 1 个月内使用完毕。
4. 若粉末不慎喷入眼睛,用清水冲洗。
5. 请不要和其他鼻喷剂混合使用,以免降低产品功效。
6. 本产品超量使用不会造成不良后果,但使用不当可能会达不到预期效果。
7. 儿童必须在成人指导下使用。
8. 本产品未灭菌,仅限单人使用。

【禁忌症】对产品中所含成分过敏者禁用。

【标识说明】

	使用前阅读说明书
	包装破损,切勿使用

【储存条件】室温干燥处密封保存

【生产日期】见标签

【失效日期】见标签

【有效期】2 年

【生产许可证编号】赣药监械生产许 20200317号

【产品注册证编号 / 产品技术要求编号】赣械注准 20242140153

【注册人名称】江西博恩锐尔生物科技有限公司

【注册人住所】江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋

【生产企业名称】江西博恩锐尔生物科技有限公司

【生产企业住所】江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋

【生产地址】江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋

【售后服务单位】江西博恩锐尔生物科技有限公司

【联系方式】0791-82267285

【修订日期】2025.12 **【版本】**B/1