

产品说明书



眼附近伤口流入眼内等、深部组织；

8. 已知有术前全身感染的患者、未控制糖尿病的患者或其他已知可干扰伤口愈合过程的疾病或情况禁用；

9. 不适用于大脑表面、中枢和/或外周神经系统的伤口闭合，因为本品会引起组织损伤及疤痕组织的形成从而导致功能失调；

10. 不适合在皮下组织使用；

【警告】

1. 粘合剂仅由已接受过培训的医生使用；

2. 粘合剂对涂有凡士林的皮肤无粘合作用，在需要粘合的组织区域应避免使用凡士林；

3. 严禁在同一部位多次重复使用；

4. 流入伤口内的游离胶块应立即取出；

5. 闭合新鲜、边缘光滑的体表伤口时，避免将本品涂抹于伤口内，否则将会影响伤口的愈合；

6. 本品应均匀涂抹，严禁过量使用；

7. 用于皮肤闭合时，聚合反应产生的热量，会使特别敏感的患者（例如儿童及老年患者）在使用的位置可能会出现烧灼感；

【注意事项】

1. 使用者须熟知粘合剂的特性；

2. 医用粘合剂固化速度很快，能够粘合大部分人体组织以及许多其他材料，必须确保手术器械、敷料或手套在使用时不要与粘合剂直接接触，以免粘附于组织上；

3. 如果完好的皮肤不慎粘合在一起，凡士林或丙酮有助于松解粘合；

4. 本品不得接触眼睛。如果眼睛接触到本品，应该用大量的生理盐水或清水冲洗眼睛。如果粘合剂在眼睛内仍有残留，使用眼

膏松解形成的粘合，并向眼科医生求助。

5. 本品开启后仅供一次性使用；

6. 本品切勿供儿童玩摸。

【可能不良反应】

1. 急性炎症反应；

2. 过敏反应；

3. 组织坏死

【包装】每一小盒中有一支单剂量涂抹器，其中涂抹A型、涂抹D型医用粘合剂配备一个备用涂抹头、使用说明书、合格证；涂抹B型、涂抹C型医用粘合剂配备一张说明书、合格证。

【标签、包装标识样图】



【储存条件、方法】

本产品应贮存在相对湿度不超过80%，温度范围为0~30℃，无腐蚀性气体、通风良好、清洁的环境内。

【有效期】2年

【生产日期】见单包装

【使用期限】见单包装

【生产许可证编号】

赣药监械生产许20200317号

【注册证编号】赣械注准20202020032

【产品技术要求编号】

赣械注准20202020032

【注册人/生产企业名称】江西博恩锐尔生物科技有限公司

【注册人/生产企业住所】江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋

【生产地址】江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋

江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号泰豪VR产业园（04-1#楼）西面一层、四层




产品说明书



【产品名称】医用粘合剂

【主要成分及组成】本产品由胶体及涂抹器组成。胶体主要成分为 α -氰基丙烯酸正辛酯，配有微量稳定剂。

【结构式】

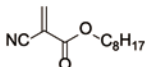

【性状】本品为无色或淡黄色透明流动性液体，略带特有味。

【型号规格】

涂抹A型：0.25ml/支，0.3ml/支，0.35ml/支，0.4ml/支，0.5ml/支，0.6ml/支，0.7ml/支，0.8ml/支，0.9ml/支，1.0ml/支，1.2ml/支，1.5ml/支

涂抹B型：0.25ml/支，0.3ml/支，0.35ml/支，0.4ml/支，0.5ml/支，0.6ml/支，0.7ml/支，0.8ml/支，0.9ml/支，1.0ml/支，1.2ml/支，1.5ml/支

涂抹C型：0.25ml/支，0.3ml/支，0.35ml/支，0.4ml/支，0.5ml/支，0.6ml/支，0.7ml/支，0.8ml/支，0.9ml/支，1.0ml/支，1.2ml/支，1.5ml/支

涂抹D型：0.25ml/支，0.3ml/支，0.35ml/支，0.4ml/支，0.5ml/支，0.6ml/支，0.7ml/支，0.8ml/支，0.9ml/支，1.0ml/支，1.2ml/支，1.5ml/支

【作用机理】

本品在创面组织液、血液等离子作用下迅速发生了阴离子聚合，瞬间发挥其强粘接作用，使其固化成膜并与创面紧密镶嵌，可牢固地保持伤口的对合状态。

【适应范围】用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。

【使用方法及用量】

1. 在使用医用粘合剂之前，伤口必须进行彻底的清洁，按照正常的皮肤处理程序进行伤口准备，并确保深层皮下层被缝合。
2. 将医用粘合剂刷头端朝上放置，按压挤压器，使内部玻璃安瓿管碎裂。
3. 将涂抹器回正方向，挤压让医用粘合剂到达尖端。
4. 回转涂抹器，刷头端朝上，随后上下震荡涂抹器。
5. 用手或器械将双侧伤口边缘对合在一起，当伤口边缘对合后，沿切口线表面分段用刷头均匀涂抹医用粘合剂，维持对合状态5~20秒，30秒后再涂抹一层粘合剂，待医用粘合剂完全固化成膜后再进行下一段伤口粘合。
6. 伤口愈合后，医用粘合剂胶膜一般在7~10天随角化皮肤脱落。

【禁忌症】

1. 该产品不能用于对氰基丙烯酸酯或甲醛过敏者（患者或操作人员）；
2. 感染部位或出血未控制的部位；
3. 未清创伤口或坏疽或褥疮引起的伤口；
4. 粘膜表面或粘膜皮肤交界处（如口腔、嘴唇）伤口；
5. 毛发覆盖的表面、湿伤口或经常接触到体液的部位；
6. 在有高张力的皮肤或活动度大可能增加皮肤张力的部位，如手、肘或膝等关节部位使用；
7. 不能避免粘合剂流到其他部位的伤口，如

【注册人/生产企业名称】江西博恩锐尔生物科技有限公司

【注册人/生产企业住所】江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋

【售后服务单位】江西博恩锐尔生物科技有限公司 【电话】0791-82267285

【网址】www.borayer.com 【修订日期】2026-01 【版本】B/3版

